
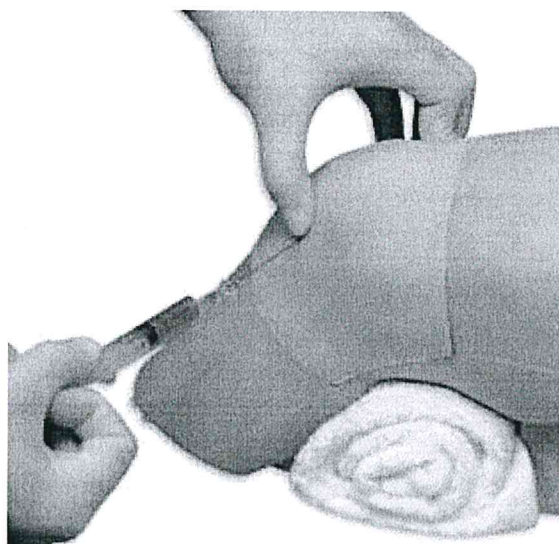
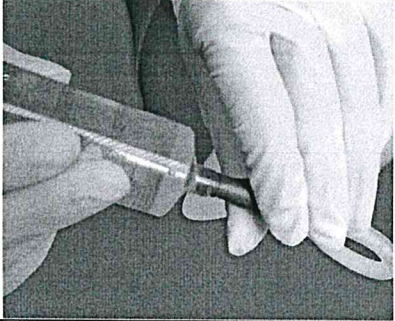
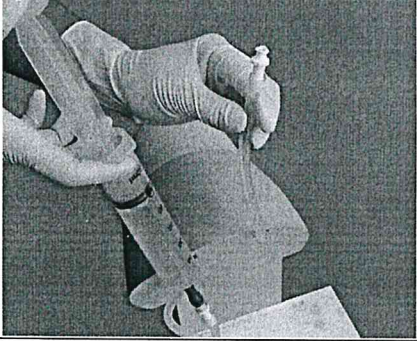


Инструкция пользователя

Фантом колена для отработки навыков пункции сустава
(в т.ч. под контролем УЗ)

SL.ARC-20

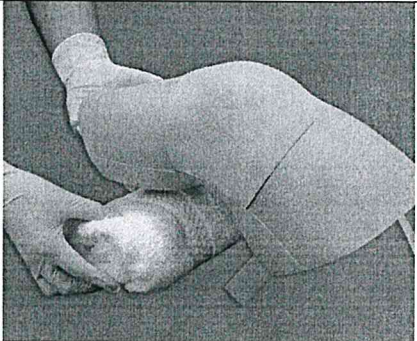

Шаг 1. Чтобы заполнить жидкостью блок ткани для артроцентеза, наберите в шприц с люэровским наконечником 60 мл воды. Для имитации различных состояний можно использовать воду, подкрашенную красным или желтым красителем.	Шаг 2. Временно снимите люэровский наконечник с другого конца, чтобы из трубки выходил воздух. Держите трубку вертикально, чтобы жидкость не вытекала.
	
Шаг 3. Медленно вливайте в трубку жидкость. Когда трубка полностью заполнится, верните на место люэровский наконечник и отсоедините шприц.	Шаг 4. Храните фантом в вертикальном положении, чтобы воздух не скапливался в области пункции. Для тренинга наклоните фантом и подложите под него полотенце, чтобы имитировать вытянутую ногу.
	
Шаг 5. Выполните пункцию колена.	Шаг 6. При необходимости замены блока для пункции снимите его с фантома, потянув за сам блок, и установите новый, направляя трубки сосудов в базу.
